



サンプル品
ご依頼OK

サーフェス仕上げ

患者様の負担を軽減

スリムネックで視界を確保

「裏面にもミラーがあったらいいな」を実現

デンタルミラー


スリムネック 両面ミラー

3P (Φ20mm) 6個入/箱 **NEW** 2024年12月新発売

4P (Φ22mm) 6個入/箱



いつもの片面ミラーと同じ使い心地で両面を鏡視

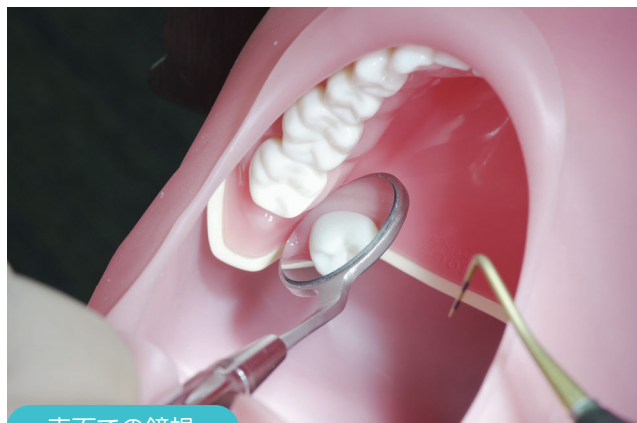

表面での鏡視



裏面での鏡視



Meinan

名南歯科貿易株式会社

※ 商品を装着しているミラーホルダー(角)は別売です。
装着している商品詳細は裏面下部にご覧いただけます。

表面反射のサーフェスマラーでゴーストが出ない

表面反射タイプのミラーでゴーストが抑えられ、診療時にくっきりとシャープな像で歯面情報を提供。使用者の視覚へ、正確な口腔内の映像を伝えます。

両面タイプのミラー自体が薄いため、特に最遠心へ入りやすく取り回しが容易です。



一般的なミラー
ゴーストが発生



スリムネック両面ミラー
そのままの映像で鏡視可能



3P 約4.8g/個
4P 約5.0g/個
※ ミラー部のみでの重さです。

※ 商品が装着されているミラーホルダー(角)は別売です。下部にある、関連商品をご参照ください。

患者様の負担を抑えるスリムネック構造

これまでは頬を牽引した際に、患者様へ大きな負担が掛かっていました。

このスリムネック両面ミラーは高い操作性で大きく開くできない年配者やお子様の診療時に効果的です。

細いスリムネック構造で、舌側でも少ない角度移動で鏡視ができます。



舌を圧排しやすく、そのままの角度で鏡視


下顎の舌側を診療・スケーリングする際に、舌を圧排しながら鏡視が行えます。

凹凸が無い平らなミラー面で抑えられるため、患者様への痛みや違和感を軽減しながら診療が行えます。

高い撥水性で視界を確保

ミラー表面は撥水性が高く、水分が親水状態になりません。

診療時の口腔内での視界不良によるストレスを軽減します。

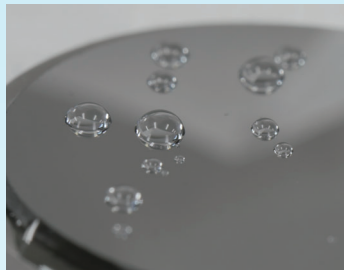

仕様及び滅菌情報

材質	ステンレス
コーティング	クロム
オートクレーブ	131°C / 60~70分 (最大 131°C)
乾燥温度	121°C
煮沸温度	95°C~97°C
推奨薬品	アルコール
入数	6個入(箱)
サイズ	3P: Φ20mm、4P: Φ22mm

販売名: スリムネック両面ミラー
一般名称: 歯鏡 一般医療機器届出番号: 23B2X10023000420

国内規格のホルダーで使用可能!

標準価格
各サイズ 6個入/箱 6,280円(税別)

関連商品

フロントサーフェスマラー




くっきりとしたシャープな像で視認性がアップ

表面仕上げのため、ゴーストを発生させずに歯牙をくっきりとシャープな像で視認できます。

販売名: フロントサーフェスマラー
一般名称: 歯鏡
一般医療機器届出番号:
23B2X10023000393

標準価格
3P (Φ20mm) 12個入 4,980円(税別)
4P (Φ22mm) 12個入 4,980円(税別)
5P (Φ24mm) 12個入 4,980円(税別)

ミラーホルダー角(5本入)

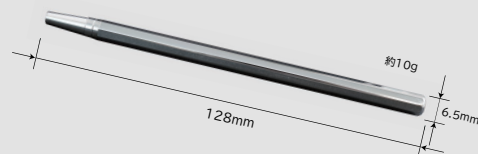

販売名: ミラーホルダー
一般名称: 歯鏡
一般医療機器届出番号:
13B3X00117000021

国産で握りやすい、約10gの角型ハンドル。オートクレーブ(135~140°C)対応です。

標準価格
1,800円(税別)

※ 製品の外觀は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売元 名南歯科貿易株式会社



本社: 〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610
東京オフィス: 〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

Web サイト



YouTube



お取扱店